

Instruments StarDental®

Solara® QT
Pièce à main à haute vitesse
Contient des pièces lubrifiées et LubeFree
Mode d'emploi

StarDental®
1816 Colonial Village Lane
Lancaster, PA 17601 États-Unis
Imprimé aux États-Unis
©2015 DentalEZ, Inc.

DentalEZ Dental Products (GB) Ltd.,
Cleveland Way,
Hemel Hempstead, Hertfordshire
HP2 7DY, ANGLETERRE

866.DTE.INFO (383.4636)
www.DentalEZ.com

StarDental®
1816 Colonial Village Lane
Lancaster, PA 17601 États-Unis
Imprimé aux États-Unis
©2015 DentalEZ, Inc.

0656093 C Date de parution 2015-12-31

EC REP

DentalEZ INTEGRATED SOLUTIONS™
CE 0344

www.DentalEZ.com

Facebook icon

Twitter icon

LinkedIn icon

Instagram icon

YouTube icon

Avertissement : La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que par ou sur la demande d'un dentiste.

NE PAS UTILISER POUR LA CHIRURGIE ORALE

AVANT D'UTILISER LA PIÈCE À MAIN, LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE ET RESPECTEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS.

Mode d'emploi

Les pièces à main dentaires à haute vitesse **Solara® QT** sont des dispositifs portables fonctionnant à l'aide d'un système pneumatique et destinés à être utilisés par des professionnels des soins dentaires pour forer dans la cavité buccale. Elles peuvent servir pour retirer des caries, pour des travaux de reconstruction, ou pour préparer des couronnes.

Contenu

Les pièces à main à haute vitesse **Solara QT** sont conçues pour fonctionner sur un pivot 360° à déconnexion rapide **StarDental**. Le **Solara QT** s'adapte aux tubes fibre optique ISO 4 lignes standard et aux tubes fibre optique ISO 4/6 lignes standard.

- Spécifications
- Installation de la pièce à main
- Utilisation de la pièce à main
- Règles de sécurité
- Lubrification - **UNIQUEMENT** pour pièces à main lubrifiées
- Nettoyage et stérilisation
- Résolution de problèmes
- Remplacement de turbine
- Numéro des pièces de rechange
- Garantie

Spécifications (nominales)

Type : Fibre optique à haute vitesse à raccord pivotant et turbine remplaçable. (Raccord pivotant vendu séparément.)

- Pression d'air de service : 30 à 34 psi
- Consommation d'air : 2,0 SCFM @ 34 psi
- Vitesse à vide : 430 000 rpm
- Connexion : Pivot 360° à déconnexion rapide avec configuration ISO 4 lignes et fibre optique. Tube fibre optique ISO 4/6 lignes.

- Puissance : 18 watts
- Poids : 32,8g





Installation de la pièce à main

Remarque : Alimentation en eau et air filtrés, filtration recommandée : 25 microns. Eau adoucie et désionisée. Vérifiez l'efficacité des filtres.

- Saisissez le raccord pivotant devant le système de palier entre votre pouce et votre index, comme le montre l'image.
- Faites glisser le raccord tube jusqu'à ce que la fin du connecteur ISO apparaisse ; gardez-le en main comme le montre l'image, pour fixer le tube.
- Alignez et insérez les tubes du pivot dans les trous du connecteur ISO.
- Tout en imposant une légère pression pour maintenir les embouts dans les trous du connecteur, faites glisser le coupleur et engagez le filetage. Continuez à visser le coupleur dans le sens horlogique jusqu'à ce que qu'il soit serré contre le pivot.
- En utilisant la clef comme indiqué, serrez le pivot au raccord du tube jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Faites bien tourner le raccord du tube, et pas le pivot.
NE SERREZ PAS TROP FORT. Connectez la pièce à main au pivot.

Remarque : Cette jointure se desserre avec le temps, entraînant une perte de puissance. Vérifiez-la régulièrement.regularidad.

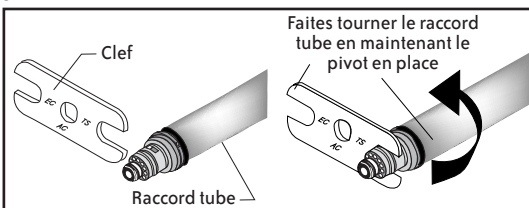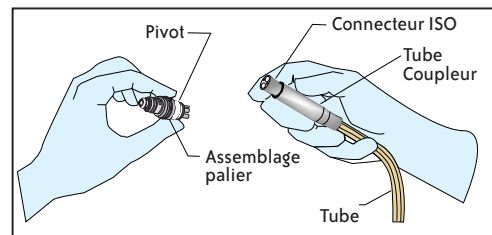

Ajustement de l'air et de l'eau

- Pression d'air –

REMARQUE **Pour éviter tout endommagement rapide de la turbine, ne dépassez pas 34 psi lorsque vous utilisez un pivot HiFlo.**

Utilisez un manomètre, pièce StarDental #262591 pour 4/6 lignes ; fixez la pression à 30-34 psi.

En l'absence de manomètre, réglez la pression à la valeur requise en prévoyant une perte de pression de 3 psi pour chaque mètre de tube. (Voir Spécifications pour pression de service recommandée.)

Par exemple, si vous désirez travailler à 34 psi et que vous utilisez 1,50 m ou 4 m de tube, la pression doit être réglée à une valeur permettant de compenser la perte de pression de l'air.

- | | |
|--------------|--------------------------|
| Tube d'1,5 m | 34 psi + 5 psi = 39 psi |
| Tube de 4 m | 34 psi + 12 psi = 46 psi |

- Pression de l'eau –

Réglez le débit d'eau jusqu'à obtenir une pulvérisation satisfaisante (débit recommandé : 30 cc/min).

- Système fibre optique 6 broches autre que StarDental :


Si la pièce à main est connectée à un système fibre optique 6 broches autre que StarDental, consultez le manuel de votre opérateur pour obtenir le voltage du système de fibre optique. Les systèmes fibre optique autres que StarDental doivent avoir une sortie de tension minimale entre 0,73 A CC et 1,5 A CC à 3,1 V CC. Utilisez une ampoule StarDental pièce #262962 pour les systèmes fibre optique autres que StarDental qui remplissent ces critères. Ajustez le voltage conformément aux instructions pour l'ampoule 3,1 V CC.

Si le système fibre optique 6 broches autre que StarDental possède une sortie d'ampérage d'au moins 1,5 A CC à 3,3 V CC, alors l'ampoule StarDental pièce #262522 peut être utilisée. Ajustez le voltage conformément aux instructions pour l'ampoule 3,3 V CC.

Utilisation de la pièce à main

Utilisez des fraises concentriques diamantées au carbure de longueur standard équipées de tiges à serrage par friction de 0,0628" de diamètre nominal conçues pour les pièces à main à haute vitesse. Toutes les fraises diamantées StarDental sont conformes aux spécifications recommandées en matière de longueur. Prenez contact avec votre revendeur pour une liste complète des fraises diamantées **StarDental**. Les turbines à serrage automatique StarDental demandent des fraises qui remplissent les caractéristiques suivantes :

Utilisez uniquement des fraises équipées de tiges en carbure ou en acier trempé. Chaque fraise diamantée **StarDental** présente le niveau de dureté requis. Avant utilisation, vérifiez la rotation concentrique de la pièce à main en l'actionnant hors de la cavité orale.

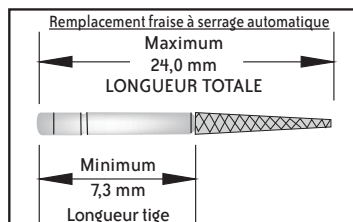


REMARQUE : N'utilisez pas une fraise trop bruyante ou non concentrique.

N'utilisez pas une fraise modifiée, excentrique, tordue, ou non galvanisée.

Remplacement fraise à serrage automatique

- Introduisez la fraise à fond dans le serrage automatique.
- Débrayez le bouton du capuchon de serrage automatique et continuez à enfoncer la fraise jusqu'au déclic indiquant la position finale.
- Relâchez le bouton. Imprimez une légère pression interne sur la fraise. Le mécanisme de serrage est en place. (Tirez toujours sur la fraise après installation pour vérifier qu'elle est en place.)

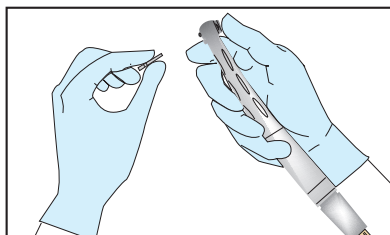

- Pour retirer la fraise, maintenez fermement la pièce à main avec le pouce sur le capuchon et poussez jusqu'au déclic.
- Tirez la fraise.
- Relâchez le capuchon.

ATTENTION

Ne relâchez jamais le bouton du capuchon de serrage et ne mettez jamais le capuchon en contact avec une partie de la cavité orale lorsque la pièce à main est en fonctionnement. Débrayer le capuchon durant la rotation de la fraise risque d'activer le dispositif de serrage et la surchauffe du capuchon ou le dégagement de la fraise.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessure :

- Insérez toujours la totalité de la tige dans la fraise. Dans le cas contraire, la fraise risque de se dégager durant l'utilisation et de blesser quelqu'un.

ATTENTION

Pour réduire le risque de blessure et de dommage de la pièce à main ou du serrage automatique :

- Remplacez la turbine si la pièce à main ne fonctionne pas à la vitesse de régime ou devient bruyante.
- Utilisez uniquement des fraises recommandées. Toute fraise mal fixée ou tordue, généralement accompagnée d'un son aigu ou d'une vibration accrue durant l'utilisation, risque de se dégager et de blesser votre patient ou vous-même.
- Suivez ces instructions de sécurité :
 - Vérifiez que la fraise est en place en tirant sur cette dernière après l'avoir installée.
 - Vérifiez que la rotation est concentrique en faisant un essai à l'extérieur de la cavité orale. Ne l'utilisez pas en cas de rotation non concentrique ou de bruit excessif.
 - N'utilisez pas la pièce à main sans fraise.
 - Utilisez toujours des fraises d'une longueur totale de moins de 24mm. La tige doit mesurer au moins 7,3mm de longueur ; la plupart des tiges de fraises courtes correspondent à ces dimensions. (voir Utilisation de la pièce à main)
 - Lorsque vous utilisez le serrage automatique, n'appuyez jamais sur le capuchon durant la rotation de la fraise.

Lubrification - UNIQUEMENT pour les pièces à main lubrifiées

Turbine à palier en céramique LUBRIFIÉE :

Afin de prolonger la durée de vie de la turbine, ne dépassez pas la pression recommandée.

Remarque : Lubrifiez la pièce à main au **DentaLube II**, pièce **StarDental** #262539, quotidiennement et avant chaque procédure de stérilisation.

- Déconnectez la pièce à main.
- Fixez l'applicateur conique à embout rouge, pièce StarDental #202954, dans le capuchon de la bouteille de DentaLube II.
- Trouvez le tube d'arrivée d'air à l'arrière de la pièce à main et versez trois gouttes de DentaLube II. (Voir illustrations pour plus de détails.)



Remarque : N'utilisez jamais la pièce à main sans fraise.

- Une fois la fraise en place, connectez la pièce à main au tube et faites-la fonctionner pendant 20 secondes afin d'éliminer l'excès de lubrifiant.

REMARQUE

Les pièces à main non lubrifiées comprennent une turbine à palier en céramique non lubrifiée.


Cette turbine utilise un palier en céramique ultramoderne qui ne demande aucune lubrification. Pour garantir le fonctionnement et éviter tout dommage de la turbine, ne pas lubrifiez en aucun cas. Si vous la lubrifiez une seule fois, vous DEVREZ la lubrifier à chaque fois que vous l'utiliserez.

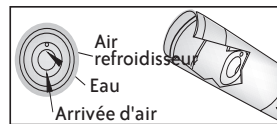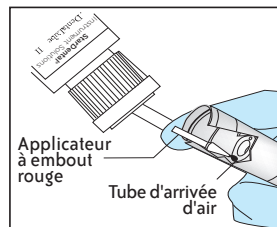

Nettoyage et stérilisation

ATTENTION	Ne dépassez pas 135°C Pour éviter d'endommager la fraise, utilisez un support autoclavable. N'utilisez pas de : <ul style="list-style-type: none"> stérilisateurs à chaleur sèche désinfectants chimiques chiffons sachets de stérilisation contenant des désinfectants stérilisateurs à froid techniques d'immersion savons sprays nettoyeurs ultrasoniques lubrifiant chirurgical détergents
Limites de restérilisation	Les stérilisations répétées ont des répercussions minimales sur cette pièce à main. L'usure et la détérioration normales liées à l'usage sont généralement la cause de sa perte d'efficacité.

INSTRUCTIONS

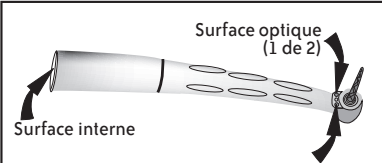AVERTISSEMENT	Nettoyez et stérilisez les pièces à main et les fraises dès que possible avant la première utilisation et après chaque patient.
Confinement et transport :	Restérilisez les pièces à main dès que possible après leur utilisation.
Préparation au nettoyage :	Retirez la pièce à main du raccord pivotant. Aucun autre démontage nécessaire.
Nettoyage - automatique :	Dispositifs de lavage et de désinfection non recommandés.
Nettoyage - manuel :	<p>Nettoyage des pièces à main :</p>  <p>Retirez les résidus des surfaces externes avec une petite brosse et de l'alcool isopropylique. Nettoyez les surfaces internes de la pièce à main à hauteur du raccord avec une petite brosse et de l'alcool isopropylique. Utilisez un tampon en coton imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer les surfaces optiques. Séchez complètement. Répétez l'opération après chaque patient.</p> <p>Nettoyage des fraises diamantées :</p> <ul style="list-style-type: none"> Après chaque utilisation, nettoyez la fraise diamantée en la faisant fonctionner sur une pierre diamantée humide. Pour un nettoyage mécanique, plonger la fraise dans une solution enzymatique, dans du nettoyant d'instrument dentaire Sparkl, pièce StarDental #205472, ou dans de l'eau. Rincez soigneusement la fraise et laissez-la sécher avant de la stériliser - voir Stérilisation.
Lubrification :	Lubrification - Pièces à main lubrifiées UNIQUEMENT - voir la section Lubrification
Désinfection :	Utilisez uniquement la stérilisation à la vapeur pour un résultat optimal.
Séchage :	Séchez la pièce à main durant 30 minutes minimum au moyen du cycle de stérilisation à sec et laissez-la refroidir à température ambiante dans un sachet avant de l'utiliser. En cas d'humidité, prolongez le cycle de stérilisation en conséquence.
Entretien :	Utilisez une fois par semaine le Junk-Out High Speed Chuck Cleaner Kit (263790) avant la stérilisation afin de garantir le fonctionnement du dispositif de serrage. Instructions de nettoyage du dispositif de serrage disponibles dans le kit Junk-Out. Voir Remplacement de turbine dans ce manuel pour de plus amples informations.
Inspection et test	Voir Utilisation de la pièce à main ou Résolution des problèmes dans ce manuel.
Emballage :	Simple : Utilisez un matériau d'emballage stérile standard. Assurez-vous que l'emballage est assez grand pour contenir la pièce à main sans risquer de céder. En jeux : Les pièces à main peuvent être installées sur des plateaux à instruments spéciaux ou des plateaux de stérilisation de type courant. Assurez-vous que les bords coupants sont protégés et ne sont pas trop nombreux par plateau selon les critères du fabricant. Enveloppez les plateaux à l'aide des matériaux et des méthodes adaptés.
Stérilisation instrument emballé :	Autoclave à déplacement par gravité : <ul style="list-style-type: none"> Au moins 15 minutes à 132°C Au moins 30 minutes à 121°C Ne dépassez pas 135°C Autoclave à pré-vidé : <ul style="list-style-type: none"> Au moins 4 minutes à 132°C
Stockage :	Une fois stérilisé, conservez le dispositif dans un sachet jusqu'à la prochaine utilisation.
Informations complémentaires	Ne dépassez pas les consignes du fabricant quant à la capacité de charge.
Contact fabricant :	Voir première ou dernière page de ce manuel.

Résolution de problèmes

Problème : PAS DE LUMIÈRE OU LUMIÈRE INTERMITTENTE

Cause : Branchement électrique.

Solution : Vérifiez les branchements : prise murale-bloc d'alimentation, bloc d'alimentation-commande lampe et commande lampe-connecteur tube.

Cause : Signal déformé entre conduite d'air et commande lampe.

Solution : Redressez la conduite d'air pour permettre le flux d'air.

Cause : Corrosion sur les broches de contact de l'ampoule.

Solution : S'il s'agit d'un raccord pivotant à 6 broches, retirez l'ampoule du raccord. Nettoyez les broches de contact de l'ampoule à l'alcool isopropylique.

Cause : Ampoule du raccord pivotant grillée.

Solution : Remplacez l'ampoule halogène-xénon par une pièce **StarDental**® #262522, ou, sur un système fibre optique 6 broches autre que StarDental, par une pièce **StarDental** #262962 (Consultez le manuel de votre opérateur pour obtenir le bon voltage). Remarque : voir Installation de la pièce à main, système fibre optique 6 broches autre que StarDental.

Problème : LUMIÈRE JAUNÂTRE

Cause : Déchets sur les surfaces optiques.

Solution : Nettoyez toutes les surfaces optiques visibles (voir Nettoyage).

Problème : LUMIÈRE FAIBLE

Cause : Basse tension.

Solution : Reportez-vous au manuel du **système électrique à fibre optique et du tube de la pièce à main StarBright** ou prenez contact avec le service clientèle de **StarDental** au 1-866-DTE-INFO.

Cause : Ampoule du raccord pivotant grillée.

Solution : Remplacez l'ampoule halogène-xénon par une pièce **StarDental**® #262522, ou, sur un système fibre optique 6 broches autre que StarDental, par une pièce **StarDental** #262962 (Consultez le manuel de votre opérateur pour obtenir le bon voltage). Remarque : voir Installation de la pièce à main, système fibre optique 6 broches autre que StarDental.

Problème : MANQUE DE PUISSANCE

Cause : Pression d'air insuffisante.

Solution : Vérifiez la pression de la pièce à main (référez-vous à la section Installation de la pièce à main).

Cause : Tube déformé.

Solution : Redressez le tube à l'intérieur et à l'extérieur de la tête de distribution.

Cause : Accumulation de débris.

Solution : Nettoyez l'intérieur du logement et du capuchon avec un coton imbibé d'alcool.



Cause : Usure de la turbine.

Solution : Reportez-vous à la section Remplacement de turbine.

Cause : Pivot pas complètement vissé sur le tube.

Solution : Reportez-vous à la section Installation de la pièce à main.


Problème : FUITE D'EAU

Cause : Joint arrière de la pièce à main et/ou du pivot cassant

Solution : Remplacez le joint arrière, pour 4 lignes, pièce **StarDental** « verte » #202897, et pour 6 lignes, pièce **StarDental** « verte » #262520. Pour Pivot HiFlo 4 lignes, remplacez pièce **StarDental** « noire » #263734 et pour pivot HiFlo 6 broches, pièce **StarDental** « noire » #263770.

Cause : Usure des joints toriques du pivot.

Solution : Remplacez les deux joints toriques à l'avant du pivot à l'aide du kit **StarDental** Voir Numéro des pièces de rechange.

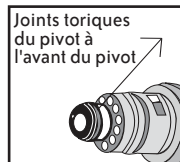

Problème : PIVOT BLOQUÉ DANS LA PIÈCE À MAIN

Cause : Dépôt de résidus.

Solution : Versez deux gouttes de **DentaLube II** sur la connexion pivot/tube ; faites tourner le raccord pour répandre le lubrifiant ; dégagez la pièce à main. Prenez contact avec le revendeur s'il vous est impossible de dégager le raccord. Pour éviter que le problème se répète, consultez la section Nettoyage.

Problème : PULVÉRISATION INCORRECTE

Cause : Filtres, tubes ou sorties d'eau bouchés.

Solution : Inspectez et nettoyez le filtre à eau dans la tête de distribution. Déconnectez la pièce à main. Relâchez la pression du pied, et vérifiez si l'eau sort du pivot. (Si l'eau ne s'écoule pas du pivot, reportez-vous au manuel d'instructions du pivot.)

Cause : Joint arrière de la pièce à main cassant.


Solution : Remplacez le joint arrière.

Cause : Usure des joints toriques du pivot.

Solution : Remplacez les deux joints toriques à l'avant du pivot à l'aide du kit **StarDental**. Voir Numéro des pièces de rechange.

Cause : Spray encombré

Solution : Utilisez une tige de nettoyage pour déboucher le spray.

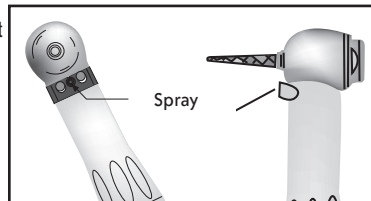

Problème : FRAISE BLOQUÉE EN SERRAGE AUTOMATIQUE

Cause : Dépôt de résidus dans le mécanisme de serrage.

Solution : Nettoyez avec le Junk Out Chuck Cleaner, pièce #263790.

Cause : Utilisation de fraises non-ISO.

Solution : Utilisez toujours des fraises ISO.

Problème : FRAISE PATINE EN SERRAGE AUTOMATIQUE

Cause : Dépôt de résidus dans le mécanisme de serrage.

Solution : Nettoyez avec le Junk Out Chuck Cleaner, pièce #263790.

Cause : Utilisation de fraises non-ISO.


Solution : Utilisez toujours des fraises ISO.

Remarque : Utilisez toujours des fraises ISO afin d'éviter qu'elles ne se bloquent et ne patinent. En cas de problème persistant, remplacez immédiatement la turbine usée par un **StarDental** Autochuck Turbine Replacement Kit - Voir les numéros de pièces de rechange. Si le problème persiste, prenez contact avec votre revendeur ou le service technique **StarDental** au 1-866-DTE-INFO.

Remplacement de turbine

Remarque : Remplacez la turbine si la pièce à main ralentit ou devient bruyante. La cartouche de rechange est disponible auprès de votre revendeur et pourra aisément être remplacée dans votre cabinet. Lorsque vous commandez un pièce de rechange, assurez-vous de commander un **StarDental** Autochuck Turbine Replacement Kit - Voir les numéros de pièces de rechange.

1. Retirez le capuchon et la turbine.
2. Inspectez le logement avant de nettoyer. Retirez tous les résidus apparents pour éviter tout dommage et garantir le fonctionnement de la turbine.
3. Connectez la pièce à main et faites souffler l'air à travers le logement sans turbine pendant 5 secondes.
4. Nettoyez complètement le logement à l'aide d'un coton imbibé d'alcool isopropylique. Séchez à l'air comprimé.
5. Placez le groupe turbine dans le logement et insérez-le délicatement comme indiqué.
6. Placez et vissez à fond le nouveau capuchon dans le logement à la main.
7. Serrez le capuchon avec la clef en utilisant l'ouverture AC comme indiqué. Placez le côté marqué de la clef face au capuchon pour un meilleur contrôle de celle-ci.

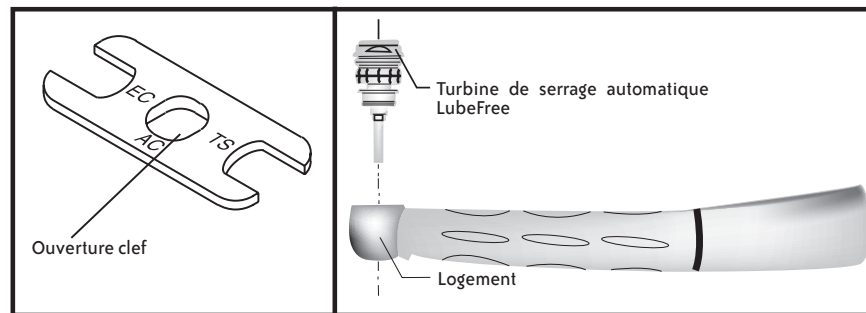

Numéro des pièces de rechange

Demandez toujours des pièces StarDental pour des résultats optimaux.

Description	Numéro de l'article
Remarque : Pivots vendus séparément.	
Pièce à main fibre optique Solara ® QT avec turbine à serrage automatique LubeFree	265718
Pièce à main fibre optique Solara ® QT avec turbine à serrage automatique lubrifiée	265791
Kit de remplacement turbine à serrage automatique LubeFree	263739
Turbine de rechange à serrage automatique et palier en céramique LubeFree E6	265807
Capuchon serrage automatique.....	261294
Clef du capuchon	203048
Ensemble pivot : fibre optique 4 lignes HiFlo.....	263758
Joint arrière, pivot fibre optique 4 lignes HiFlo (jeu de 3)	263734
Ensemble pivot LED StarBright® Plug n' Play™	265646
Pivot HiFlo 6 broches 3,3 volts	263772
Pivot HiFlo 6 broches 3,1 volts	263773
Joint arrière, pivot fibre optique 6 broches HiFlo (jeu de 3)	263770
Ampoule de remplacement, 6 broches 3,3 V CC pour pivot connecté au système fibre optique StarBright (jeu de 2)	262522
Ampoule de remplacement, 6 broches 3,1 V CC pour pivot connecté à un système fibre optique autre que StarBright (jeu de 2)	262962
Jeu de joints toriques pour tous pivots StarDental (2 grands, 2 petits)	259884
Manomètre (ISO 4/6 lignes)	262591
Tige de nettoyage (calibre : 0,008, jeu de 2)	256719
Vis de pression pour tube ISO (jeu de 2)	261355
Clef Allen .035	280830
Nettoyant serrage à haute vitesse Junk-Out	263790
Nettoyeur d'instruments dentaires SPARKL®	205472
DentaLube II.....	262539



Avis important concernant le retour de produits à DentalEZ Inc.

Tout retour d'un produit du DentalEZ® Inc. doit auparavant faire l'objet d'un numéro d'AUTORISATION DE RETOUR fourni par notre service clientèle. Ce numéro doit être clairement mentionné à l'extérieur et à l'intérieur de l'emballage du produit retourné. Pour toute demande d'un numéro d'autorisation de retour, vous devrez fournir les informations suivantes :

Pour obtenir un numéro d'autorisation de retour, appelez le 1-866-DTE-INFO

- Nom du produit, numéro du modèle, ou numéro de la pièce
- Numéro de série du produit
- Numéro du bon de commande de retour du vendeur
- Raison du retour
- Copie de la facture d'achat

Les articles seront vérifiés. Un numéro d'autorisation de retour ne constitue pas une garantie de remboursement. Votre coopération nous aidera à accélérer le processus de retour.

Pour toute information concernant les nouveaux produits, les manuels ou pour des détails techniques, appelez le 1-866-DTE-INFO ou visitez notre site www.dentalez.com

Limites de garantie

Les joints toriques et autres joints sont exclus de la garantie.

DentalEZ® garantit les pièces à main **Solara**® **QT** durant un an à compter de la date d'achat*, à l'exception des fibres optiques, qui bénéficient d'une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat*.

Conditions de garantie :

- La garantie couvre les vices de fabrication uniquement et ne s'applique pas aux défauts entraînés par une négligence, une manipulation, un nettoyage ou un entretien incorrect, l'usure ou la détérioration normale et la non-observation des instructions de fonctionnement, d'entretien ou d'installation. **Toute utilisation de composants non d'origine ou toute réparation non autorisée annulera cette garantie.**
- **La garantie se limite, à notre seule discrétion, à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue, notamment, mais pas uniquement, les dommages directs ou indirects.**
- CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, AINSI QUE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. AUCUN EMPLOYÉ, REPRÉSENTANT OU REVENDEUR N'EST AUTORISÉ À MODIFIER LES TERMES DE CETTE GARANTIE, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, OU À ACCORDER UN AUTRE TYPE DE GARANTIE.

*À condition que les conditions prévues par la garantie soient réunies.



ENREGISTREMENT GARANTIE

VISITEZ UN DES SITES CI-DESSOUS POUR ENREGISTRER VOTRE PRODUIT STARDENTAL. VOUS POURREZ AINSI BÉNÉFICIER D'UNE ASSISTANCE RAPIDE ET PRÉCISE EN CAS D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION DE VOS ACHATS AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.

Produits Oral Cancer Screening System Identafi® :
www.identafi.net/warranty

Autres produits StarDental® : www.dentalez.com/warranty