

Opěrku hlavy lze použít u pacientů na invalidním vozíku.

KROK 1: Posuňte opěrku hlavy nahoru, dokud se neuvolní z křesla (OBR. 1).

KROK 2: Otočte opěrku hlavy o 180°. Nasuňte otočenou opěrku hlavy zpět do opěrky zad a zatlačte dolů (OBR. 2).


KROK 3: Nastavte křeslo do zcela vzpřímené polohy. Nastavte výšku opěrky hlavy posunutím křesla nahoru či dolů (pomocí funkce zvednutí základny na nožním ovládní nebo touchpadu).

KROK 4: Umístěte opěrku hlavy dle potřeby (OBR. 3).


KROK 5: Umístěte invalidní vozík za opěrku hlavy (OBR. 4).

VAROVÁNÍ: Před umístěním hlavy pacienta na opěrku hlavy se ujistěte, že jsou zajištěny zámky kol invalidního vozíku.


OBR. 1:

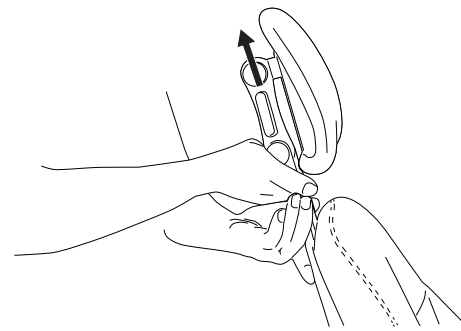


OBR. 2:

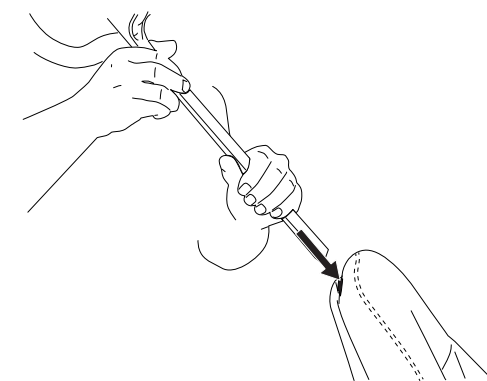

OBR. 3:

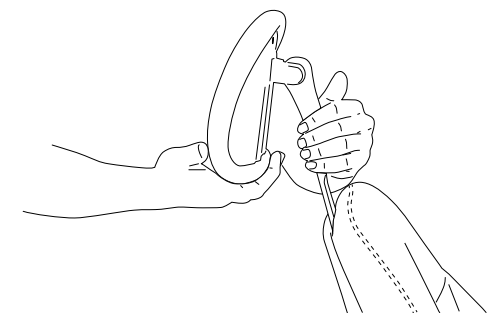

OBR. 4:

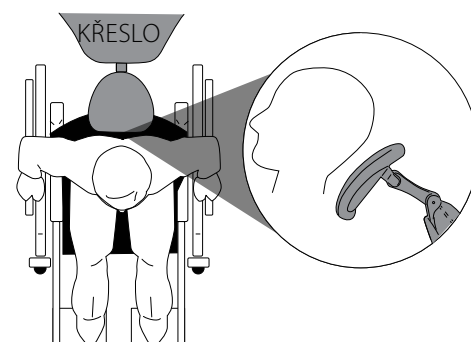

Forest DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.

UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.

POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.

UPOZORNĚNÍ: Abyste při manipulaci s obvodovými deskami, ovládacími prvky křesla a kabely nebo při práci v oblasti elektrických obvodů předešli poškození elektroniky elektrostatickým výbojem (ESD), vždy noste uzemněné poutko na zápěstí připojené k uzemňovacímu adaptéru (např.: zástrčku Banana nebo Grounding).

UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest™, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankcionovány.

POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.

Požadované nářadí: šestihřanný klíč 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 3/16", 5/32, řehťáčkový klíč 17 mm nebo 3/4 a 24 mm nebo 15/16", křížový šroubovák, vodováha a Loctite 242.

ROZBALENÍ A NASTAVENÍ

KROK 1: Odřízněte a odeberte stahovací popruhy z balení (OBR. 1).

KROK 2: Odšroubujte šrouby, které drží karton k ližině. Karton zlikvidujte.


KROK 3: Odšroubujte šrouby pod ližinou, které místo drží na místě.

KROK 4: S pomocí druhé osoby zvedněte a posuňte křeslo z ližiny.

VAROVÁNÍ: Zvedání křesla z ližiny provádějte nejméně ve dvou osobách.


UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte ramena křesla k přesunu či umístění křesla.

OBR. 1:

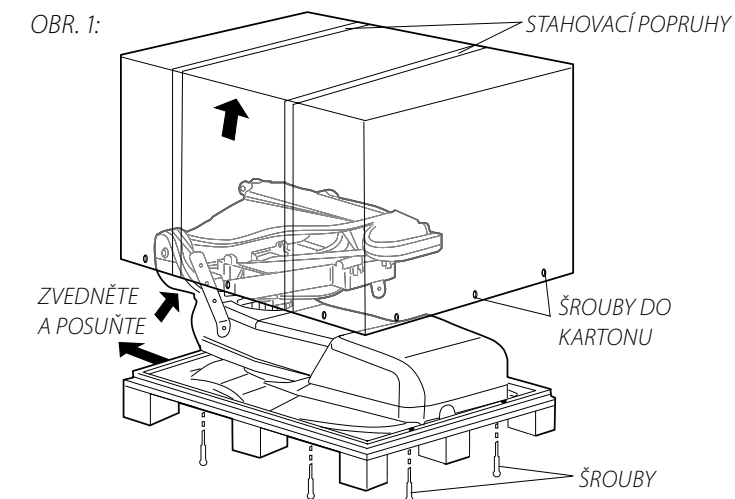

KROK 5: Naneste na závity stavěcího šroubu jednu kapku přípravku Loctite 242. Našroubujte a utáhněte stavěcí šrouby (OBR. 2).

OBR. 2:

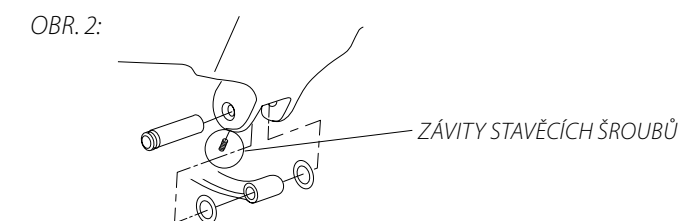


KROK 6: Pokud je na křeslo namontován touchpad, vytočte touchpad ven (na straně loketní opěrky) a utáhněte šrouby (OBR. 3). Pokud je na křeslo namontován touchpad nebo je předem nainstalována propojka nožního ovládní.

OBR. 3:



KROK 7: Křeslo se po zapojení do zásuvky vysune do zcela vyvýšené polohy (OBR. 4).

OBR. 4:

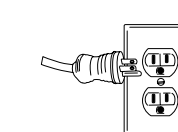

KROK 8: Před instalací dalších produktů odeberte propojku z desky s plošnými zdroji.

INSTALACE ČALOUNĚNÍ

KROK 1: Snižte tuhost opěrky hlavy (OBR. 6). Posuňte opěrku hlavy nahoru, dokud se neuvolní z křesla, a dejte ji bokem (OBR. 1).

KROK 2: Namontujte na desku sedadla polštář (OBR. 2).

! POZNÁMKA: Pokud je čalounění odesláno s křeslem, je rám sedadla předem nainstalován.

KROK 3: Namontujte loketní opěrky na desky pro loketní opěrky. Naneste na závity šroubu jednu kapku přípravku Loctite 242; namontujte a utáhněte (OBR. 3).

KROK 4: Namontujte polštář zádové opěrky tak, že jej zatlačíte dovnitř a poté posunete dolů do vymezovacích prvků (OBR. 4).

! POZNÁMKA: Pokud byly objednány i popruhy než namontujete zádovou vycpávku, postupujte podle kroku 3 instalace popruhů.

KROK 5: Aby vymezovací prvek správně pasoval, může vyžadovat nastavení opěrky zad (OBR. 5).

KROK 6: Znovu namontujte opěrku hlavy a upravte tuhost posunu (OBR. 6).

INSTALACE POPRUHŮ

KROK 1: Odeberte vycpávku opěrky zad, tak že ji zvednete nahoru a pak vytáhnete směrem ven (OBR. 1).


KROK 2: Pod obě loketní opěrky nalepte suchý zip (OBR. 2).

KROK 3: Nasadte popruh přes loketní opěrku a zatáhněte popruh zpět směrem k desce opěrky zad. Umístěte každý popruh na přibližné umístění a nainstalujte suchý zip a připevněte popruh na suchý zip. Zatáhněte za každý popruh, abyste je přitáhli, a dokončete (FIG. 3).


KROK 4: Nainstalujte vycpání opěrky zad (OBR. 4).

KROK 5: Instalace dokončena.


OBR. 1:

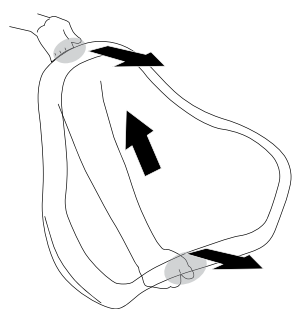


OBR. 2:

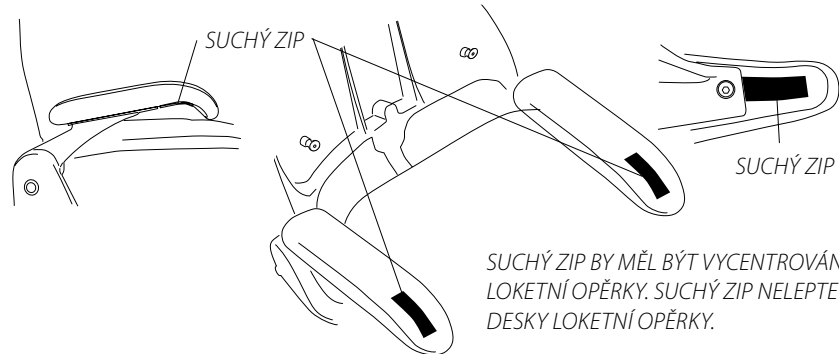


DO ZAPUŠTĚNÉ ČÁSTI (POD PODPĚROU LOKETNÍ OPĚRKY) NAMONTUJTE DRŽÁK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ. 3:

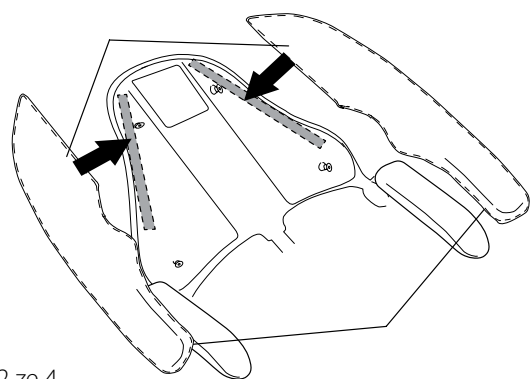


OBR. 4:

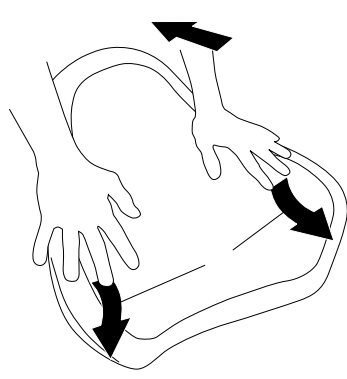


OBR. 5:

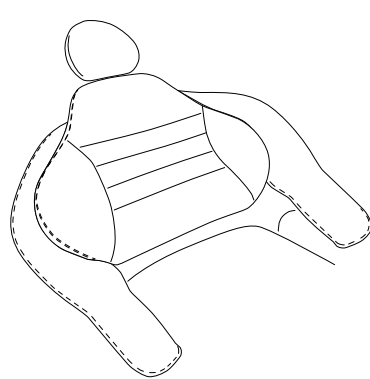


OBR. 1:

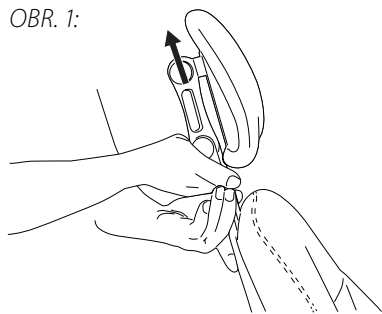


OBR. 2:

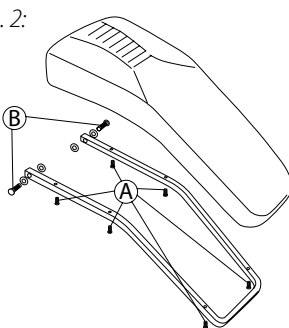


OBR. 3:

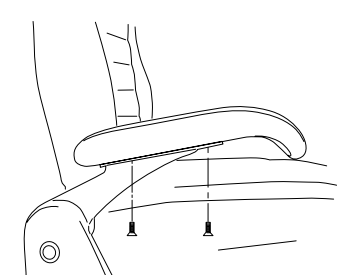


OBR. 4:

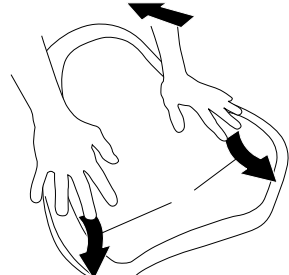

OBR. 5:

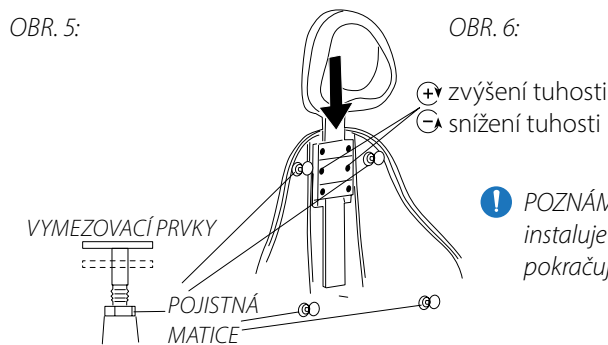

OBR. 6:

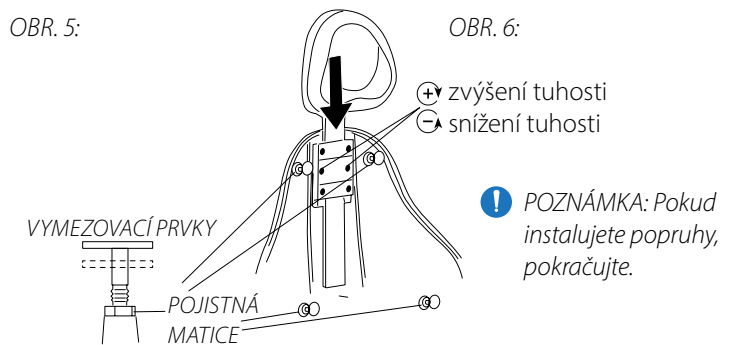

MOŽNOST MASÁŽE

! POZNÁMKA: Pokud byla masážní funkce objednána, umbilikální připojení a další masážní prvky budou na křesle předem nainstalovány.

KROK 1: Odeberte kryty křesla (OBR. 1).

KROK 2: Umístěte modul do utility schránky a navedte kabel přes spirálovou ohebnou hadičku (OBR. 2).


KROK 3: Připevněte vycpávku opěrky zad tak, že ji zatlačíte dovnitř a potom dolů (OBR. 3 na straně 2).

KROK 4: Připojte hadičky a trubku (OBR. 4).

KROK 5: Připevněte držák trubky (OBR. 5).


KROK 6: Vložte trubku do držáku (OBR. 6).

OBR. 1:

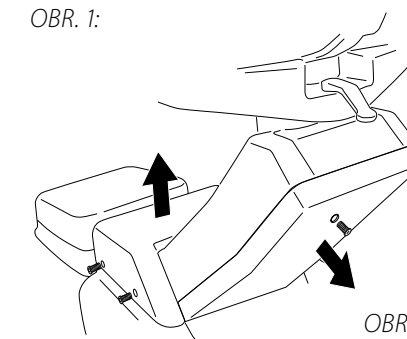


OBR. 2:


Navedte kabel dálkového ovládání přes spirálovou ohebnou hadičku.

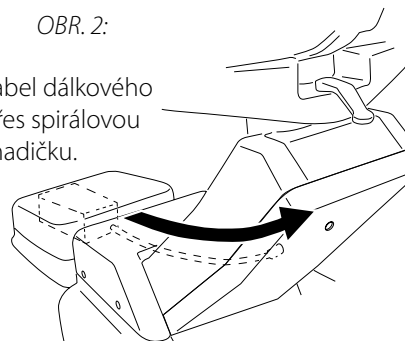


OBR. 3:

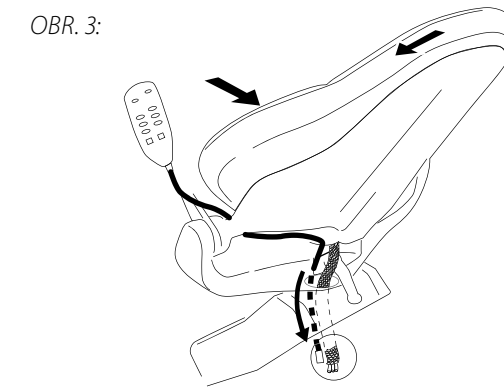

OBR. 5: **! POZNÁMKA:** Ujistěte se, že otvor v přední části směřuje ke spodní straně křesla.

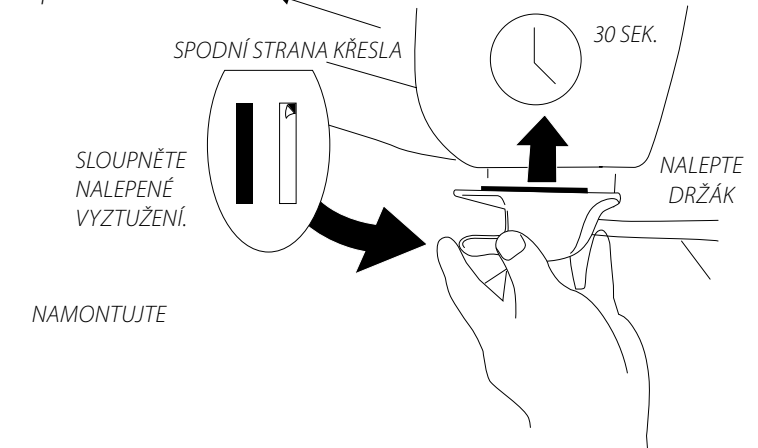

OBR. 6:

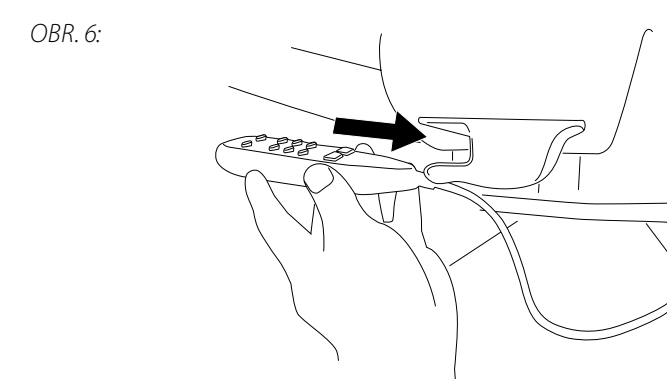

OBR. 4:

