

**!** HUOMIO: Kiinnitysruuvit asennettiin sylkykupin navan, säiliön ja koristepeitteen ohella puhdasvesijärjestelmän asennuksen aikana, jos sylkykuppi tilattiin FE-mallin kanssa.

VAIHE 1: Asenna sylkykupin puristinrakenne ohjainpylvääseen (KUVA 1).

VAIHE 2: Aseta sylkykupin laakeriholkki telineeseen (KUVA 2).


VAIHE 3: Aseta sylkykuppivarsi laakeriholkkiin. Reititä nesteenpoistoputket ulos alhaalta ja läpi litteän Forest-tuolin sovittimen reiästä.

VAIHE 4: Peitä nesteenpoistoputket joustekierreputkella ja kiinnitä jakelukeskukseen.


**!** HUOMIO: Sylkykupin koontijohto on erillään lääkärin hoitoyksikön koontijohdosta.

VAIHE 5: Asenna sylkykupin kulho, siivilä, hanat ja kupinpidike.

KUVA 1: SYLKYKUPIN NAVAN ASENNUS SYLKYKUPIN NAVAN JA VALOPYLVÄÄN SUUNTA

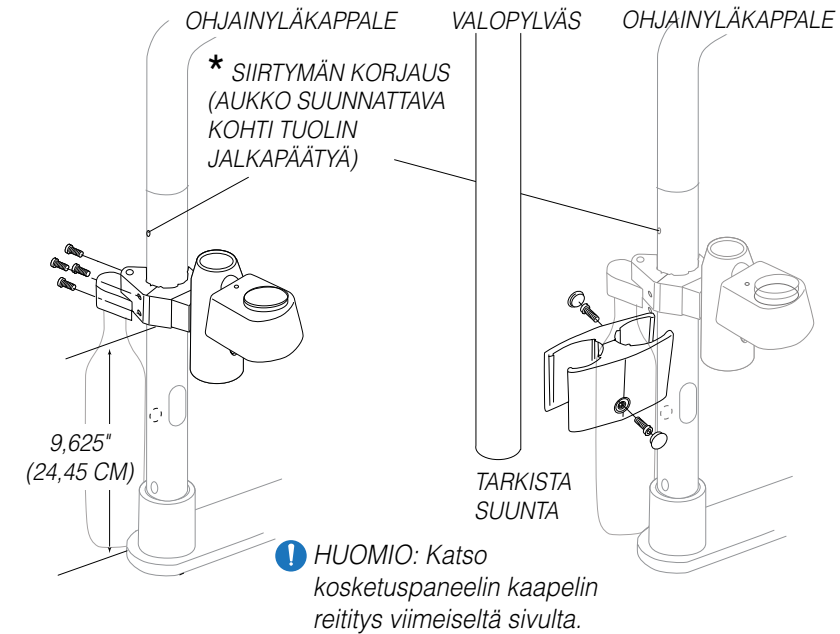

KUVA 2:

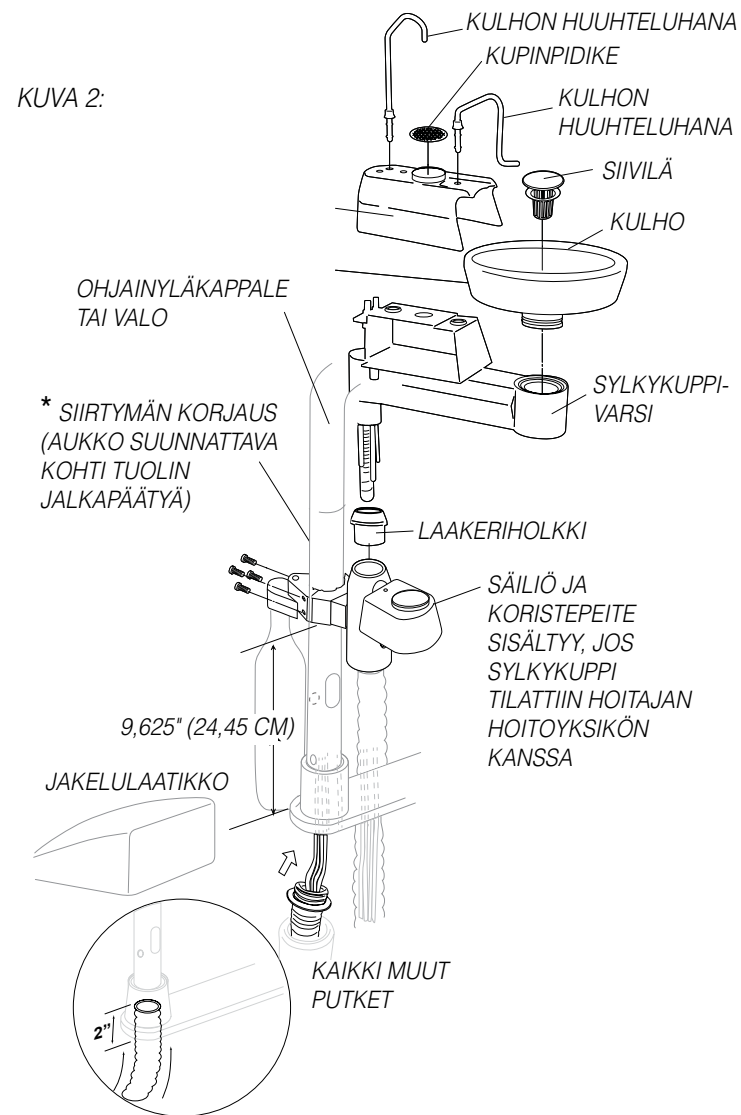

# Forest

## DENTALEZ

### HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

**!** VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henköturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vammaa.

**!** TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.

**!** HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.

**!** TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest™-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.

**!** HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.

Tarvitavat työkalut: 5/32 tuuman (3,97 mm), 3/16 tuuman (4,76 mm), 5/64 tuuman (1,98 mm) ja 1/8 tuuman (3,18 mm) kuusioavain ja vesivaaka.

**!** HUOMIO: Jos asennat monitorirakennetta, katso Monitoritelineen asennusohje.

### VAIN VALO EI OHJAINYLÄKAPPALETTA


VAIHE 1: Aseta valopylväs tuolin sovittimen telineeseen (KUVA 1).

VAIHE 2: Säädä pylväs vaakatasoon vesivaavalla ja tuolin sovittimen telineen vaakasäätöruuveilla. Kiristä ruuvit tiukasti.

VAIHE 3: Aseta valon laakeriholkki pylvääseen.

VAIHE 4: Työnnä valo laakeriholkkiin ja reititä samalla valokaapeli alas pylvään läpi ja ulos pohjasta virtalähteeseen.

KUVA 1:

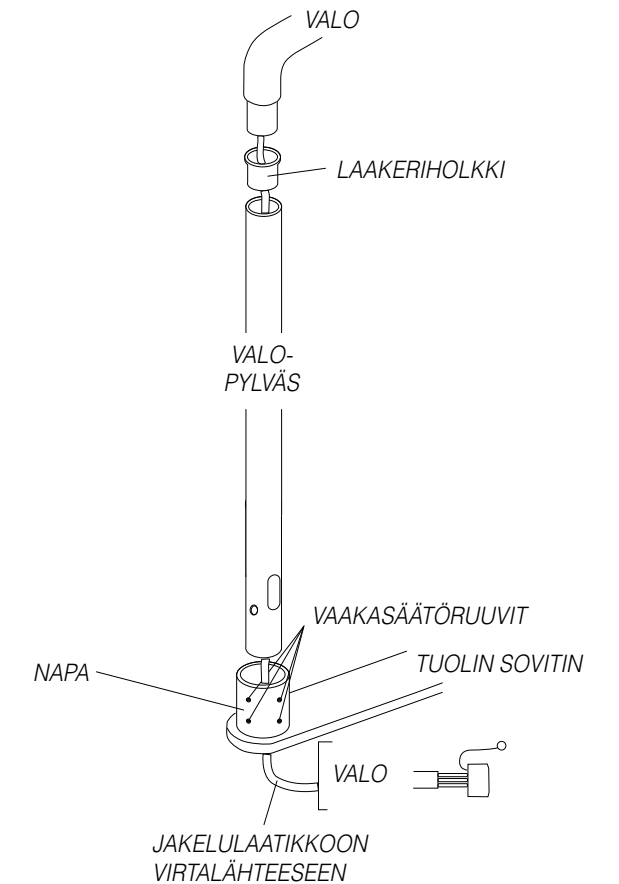

## LÄÄKÄRIN HOITOYKSIKKÖ

**! HUOMIO:** Katso jakelukeskuksen asennusohjeesta ja kaaviosta tietoja koontijohdon liittämistä.


**VAIHE 1:** Aseta hoitoyksikön ohjainpylväs tuolin sovittimen telineeseen (KUVA 1).

**VAIHE 2:** Säädä pylväs vaakatasoon vesivaa'alla ja tuolin sovittimen telineen vaakasäätöruuveilla. Kiristä ruuvit tiukasti.

**VAIHE 3:** Aseta ohjainyläkappaleen varsi pylvääseen nailontiivistysrenkaan ja reunarenkaan jälkeen.

**VAIHE 4:** Reititä yksikön koontijohto ohjainpylvään läpi jakelukeskukseen.

KUVA 1:

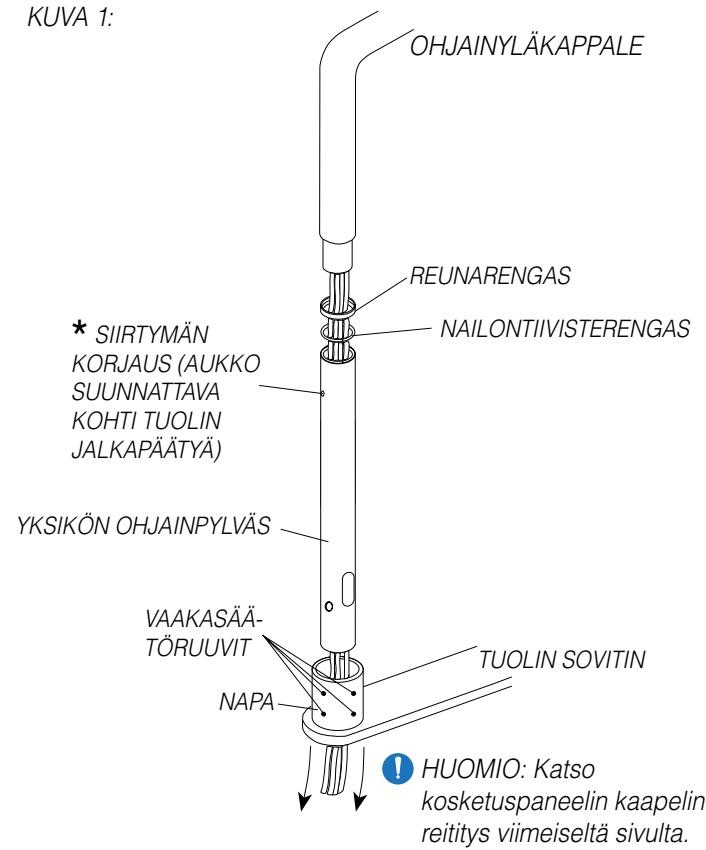

## PUHDASVESIJÄRJESTELMÄ

**! HUOMIO:** Jos valopylväs on tilattu, asenna valopylvään puristin ennen puhdasveden puristinta.

**VAIHE 1:** Asenna puhdasvesijärjestelmä hoitoyksikön ohjainpylvääseen (KUVA 2).

**! HUOMIO:** Puhdasvesijärjestelmä ja aukko on suunnattava kohti tuolin jalkapäätyä.


**VAIHE 2:** Reititä putket yksikön ohjainpylvään läpi ja alas jakelukeskukseen.

**! HUOMIO:** Jos yksikköön kiinnitetty valinnainen kosketuspaneeli on tilattu, reititä kaapeli tuolin sovittimen alta tuolin piirilevyyn ja yhdistä.

**VAIHE 3:** Peitä koontijohto joustekierreputkella ja kiinnitä johto koontijohdon renkaalla pylvään alle ja holkeilla jakelukeskukseen.

**! HUOMIO:** Jos on tilattu valo- ja/tai hoitajan teleskooppivarsi, ohita vaihe 3 ja siirry sivulle 3.

KUVA 2:

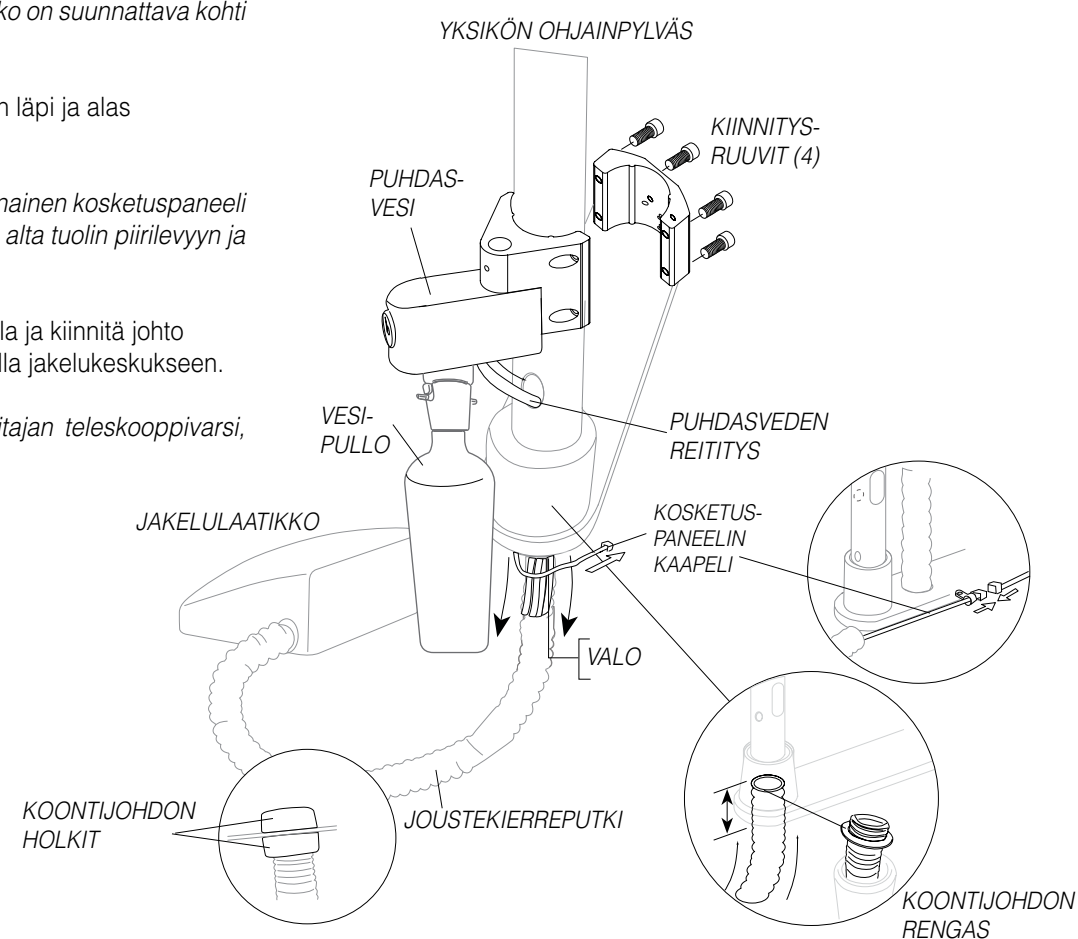

## VALOPYLVÄÄN KOKOAMINEN

**VAIHE 1:** Asenna valopylväs ja puristinrakenne yksikön ohjainpylvääseen, noudata suuntakuvaa. Kiristä ruuvit tiukasti (KUVA 1).

**VAIHE 2:** Aseta valon laakeriholkki pylvääseen.


**VAIHE 3:** Työnnä valo laakeriholkkiin ja reititä samalla valokaapeli alas pylvään läpi ja ulos pohjasta sekä yksikön ohjainpylvääseen ja alas pohjasta.

**VAIHE 4:** Jos hoitajan teleskooppivartta ei tilattu, siirry puhdasvesijärjestelmän vaiheeseen 3 sivulla 2 ja peitä yksikön koontijohto ja valokaapeli.

**! HUOMIO:** Jos valo- ja pylväsrakenteet tilattiin ilman lääkärin hoitoyksikköä, joustekierreputki ei sisälly.

**! HUOMIO:** Jos hoitajan teleskooppivarsi on tilattu, ohita vaihe 4 ja siirry hoitajan teleskooppivarteen alla.

KUVA 1:

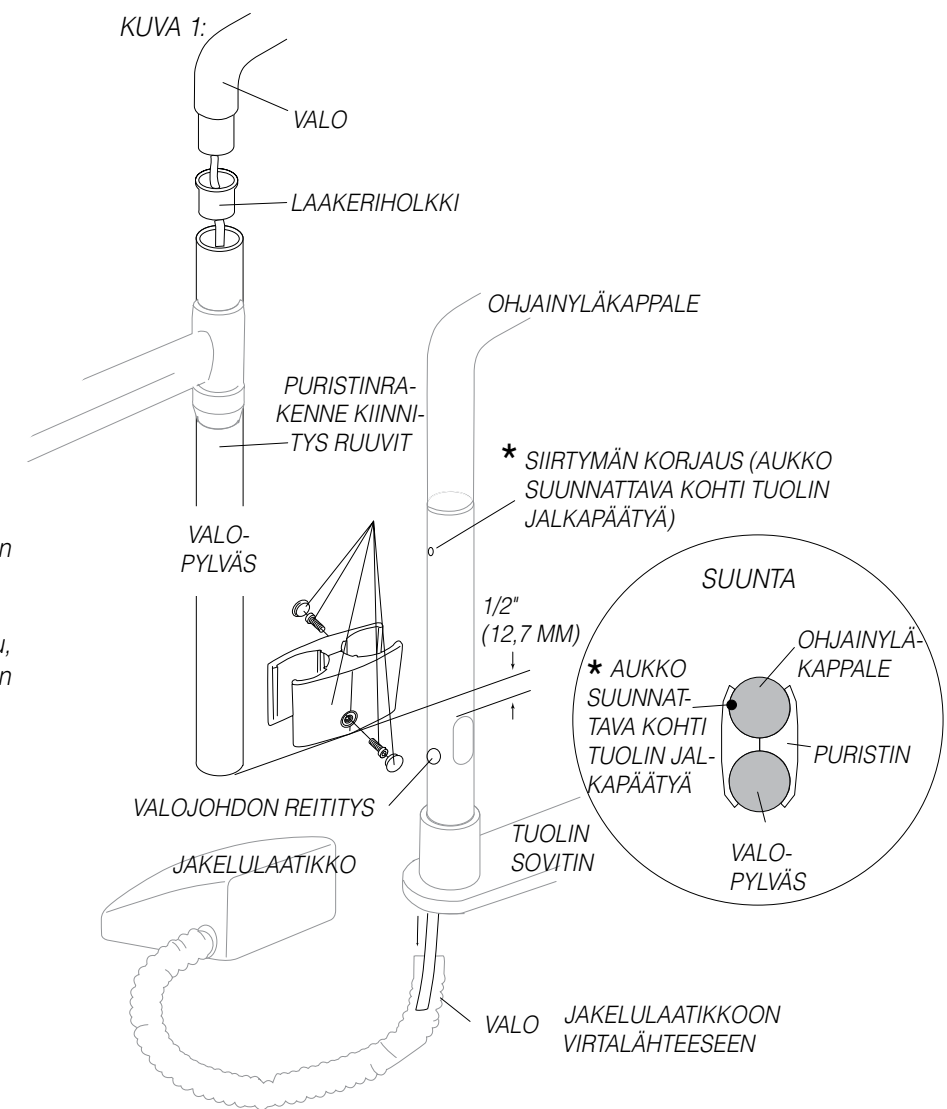

KUVA 1:

## HOITAJAN TELESKOOPPIVARSI

**! HUOMIO:** Kiinnitysruuvit asennettiin sylkykupin navan, säiliön ja koristepeitteen ohella puhdasvesijärjestelmän asennuksen aikana, jos sylkykuppi tilattiin FE-mallin kanssa.

**VAIHE 1:** Työnnä teleskooppivarren yhteen puolituumainen tappi reikään puristinrakenteen yläosassa (KUVA 1).

**VAIHE 2:** Reititä nesteenoisto ohjainpylvääseen aukon läpi ja alas pylvään pohjasta.

**VAIHE 3:** Kytke tehoimukärjen tai -kärkien ja sylki-imurin putket säiliön liittätöihin koristekannen alle.

**VAIHE 4:** Aseta ruisku, tehoimukärki/-kärjet ja sylki-imuri pidikkeeseen.

**! HUOMIO:** Säädä teleskooppivarsi siirtymän tapauksessa vaakatasoon.

**VAIHE 5:** Siirry puhdasvesijärjestelmän vaiheeseen 3 sivulla 2 ja peitä yksikön koontijohto, nesteenoistoputket ja valokaapeli (tarvittaessa).

**! HUOMIO:** Jos hoitajan teleskooppivarsi tilattiin ilman lääkärin hoitoyksikköä, ohita vaihe 5 ja reititä nesteenoistoputket jakelukeskukseen.

