

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

! *POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

⚠ *VAROVÁNÍ: Místní předpisy vyžadují, aby instalaci utility centra prováděli pouze licencovaní instalatéři a elektrikáři. Zajistěte, aby všechny instalace odpovídaly platným místním předpisům. Je-li požadován zavzdušňovací ventil, měl by jej dodat a nainstalovat dodavatel.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Tato publikace týkající se utility centra slouží pouze ke stanovení potrubních rozvodů a elektřiny. Súpůčmpst Forest™ doporučuje použít pouzdro utility centra ke stanovení umístění montážních otvorů.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankcionovány.*

! *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

TECHNICKÝ POPIS / SPECIFIKACE

VZDUCH

1/2" M.P.T. vystupující 2,5 cm z dokončené podlahy.

Tlak by měl být 90–100 PSI.

Po připojení kompresního ručního uzavíracího ventilu 3/8" propláchněte vzduchové potrubí.

VODA

1/2" M.P.T. vystupující 2,5 cm z dokončené podlahy.

Tlak by měl být 40–80 PSI.

Po připojení kompresního ručního uzavíracího ventilu 3/8" propláchněte vodní potrubí.

Pokud používáte městskou přípojku vody, v utility centru by měl být pro pravidelné testování vody dostupný přípojný bod pro odběr vzorků přichozí vody. Informace o kontrolách a dezinfekci vody dentální jednotky naleznete v provozní příručce k údržbě vedení vody dentální jednotky Forest.

ELEKTRICKÁ VEDENÍ

1/2" a čtyřvodičový kabel nebo ekvivalentní zdírka dodaná zhotovitelem.

Požadavky připojení k NEC s horní částí boxu, která není výše než 10 cm nad dokončenou podlahou, aby se zajistilo pevné nasazení víka.

GRAVITAČNÍ ODTOK

3/4" I.D. vystupující 2,5 cm z dokončené podlahy.

Umístěte lapač dodaný dodavatelem pod podlahu a v souladu s místními předpisy.

Maximální průtok odpadní vody je 7,6 litrů za minutu při použití minimálního sklonu 0,5 cm na 30 cm.

CENTRÁLNÍ VAKUUM

3/4" I.D. vystupující 2,5 cm z dokončené podlahy.

Vodovodní vedení do utility centra by měl specifikovat dodavatel centrálního vakua.

Dentální jednotky se v závislosti na konfiguraci připojují k 5/8" nebo 1/2" hrotu.

