

#### HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

**⚠** VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.

**⚠** TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.

**!** HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.

**⚠** VAROITUS: Paikallisten säädösten nojalla vain pätevät putki- ja sähköasentajat saavat asentaa jakelukeskuksen. Varmista, että koko putkisto noudattaa paikallisia vaatimuksia. Alihankkijan on toimitettava ja asennettava tyhjiöventtiili, jos sellainen tarvitaan.

**⚠** TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tätä jakelukeskusta koskevaa kirjoitusta on käytettävä vain vesi- ja sähköjohtojen sijaintien määrittämiseen. Forest™ suosittelee kiinnitysreikien sijaintien määrittämiseen jakelukeskuksen kotelo.

**⚠** TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.

**!** HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.

#### TEKNINEN KUVAUS / TEKNISET TIEDOT

##### ILMA

1/2" (12,7 mm) M.P.T. erkanee valmiista lattiasta 1 tuuman (25,4 mm).

Paineen on oltava 90–100 psi (6,21–6,89 baaria).

Huuhtele ilmaputkisto, kun manuaalinen 3/8 tuuman (9,53 mm) kompressiosulkuventtiili on yhdistetty.

##### VESI

1/2" (12,7 mm) M.P.T. erkanee valmiista lattiasta 1 tuuman (25,4 mm).

Paineen on oltava 40–80 psi (2,76–5,52 baaria).

Huuhtele vesiputkisto, kun manuaalinen 3/8 tuuman (9,53 mm) kompressiosulkuventtiili on yhdistetty.

Kunnallista vesiverkostoa käytettäessä jakelukeskuksen vesinäyteliittymispisteen on oltava käytettävissä säännöllistä veden testausta varten. Katso Forest-hoitokoneen vesijohtojen huolto – Käyttäjän oppaasta tietoja hoitokoneen veden valvonnasta ja desinfiointista.

##### SÄHKÖ

1/2 tuuman (12,7 mm) johto ja alihankkijan toimittama neliosainen tai vastaava pistorasia.

Johdota paikallisten vaatimusten mukaan niin, että pistorasian yläosa on enintään 4 tuuman (10 cm) korkeudella valmiista lattiasta, jotta kansi mahtuu tiiviisti.

##### VIEMÄRIKAIVO

3/4" (19,05 mm) I.D. DN erkanee valmiista lattiasta 1 tuuman (25,4 mm).

Aseta alihankkijan toimittama lukko lattiatason alapuolelle ja paikallisia vaatimuksia noudattaen.

Jäteveden enimmäisvirtaama on 2 galloniaa (9 l) minuutissa vähimmäiskaltevuudella 0,25 tuumaa/jalka (6,35 mm per 30,48 cm).

##### KESKUSIMURI

3/4" (19,05 mm) I.D. erkanee valmiista lattiasta 1 tuuman (25,4 mm).

Keskusimurin toimittajan tulee määrittää putkisto jakelukeskukseen.

Hoitokoneet liitetään 5/8 tuuman (15,88 mm) tai puolen tuuman (12,7 mm) liitinhylsään kokoonpanosta riippuen.

