


Forest

DENTALEZ

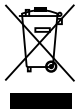

Katso symbolien selitykset, käyttöehdot, sähkömagneettista yhteensopivuutta / sähköturvallisuutta koskeva vakuutus ja käyttäjän ohjeet yleisestä Forest™:n käyttäjän oppaasta.

KÄYTTÖAIHEET/KÄYTTÖTARKOITUS Jakkaran tarkoitus on parantaa potilaan suuontelon näkyvyyttä ja hammaslääkärin ulottuvuutta suuonteloon diagnosoitaessa ja hoidettaessa kliinisessä ympäristössä. Tuotteelle ei ole vasta-aiheita.

VAROITUS: Tarkista pinta- ja estetoimenpiteet Forestin Hoitolaiteiston aseptiikka – käyttäjän oppaasta.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Yhdysvaltain lain mukaan tätä välinettä saa myydä pätevä hammaslääkäri vain siinä Yhdysvaltain osavaltiossa, jossa hän toimii ja käyttää laitetta tai jossa hän tilaa laitteen, tai muu henkilö hammaslääkärin määräyksestä.


6176 LÄÄKÄRIN JAKKARA JA 6187 HOITAJAN JAKKARA (KUVA 1)

VAIHE 1: Säädä istuimen korkeutta nostamalla oikeanpuoleista etuvipua (KUVA 1.1).


VAIHE 2: Säädä istuimen kaltevuutta nostamalla oikeanpuoleista takavipua (KUVA 1.2).

VAIHE 3: Löysää selkänöjaa kääntämällä selkänöjan korkeudensäätonuppia vastapäivään. Kun korkeus on hyvä, lukitse selkänöja paikalleen kääntämällä selkänöjan korkeudensäätonuppia myötäpäivään (KUVA 1.3).

VAIHE 4: Säädä selkänöjan kaltevuutta nostamalla vasenta vipua. Vapauta selkänöja painamalla vasenta vipua alas, kunnes vipu lukkiutuu paikalleen (KUVA 1.4).

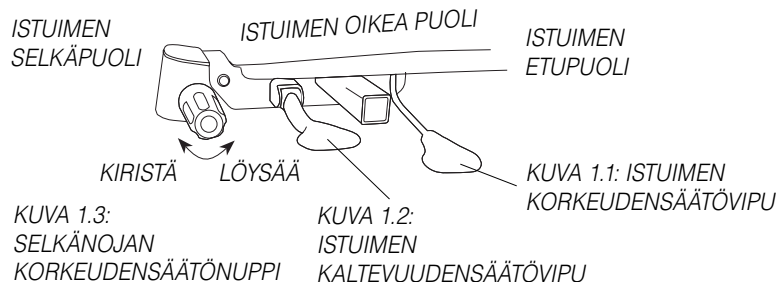

ISTUIMEN VASEN PUOLI

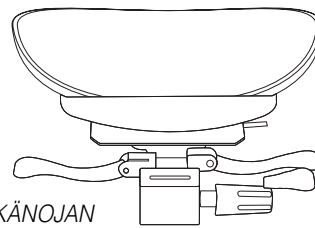

ISTUIMEN OIKEA PUOLI

KUVA 1.4: SELKÄNOJAN KALTEVUUDENSÄÄTÖVIPU

6187 HOITAJAN JAKKARA (KUVA 2)

VAIHE 1: Säädä ylävartalontukivarren korkeutta kääntämällä säätönuppia vastapäivään (löysää) tai myötäpäivään (kiristä) (KUVA 2.1).

VAIHE 2: Käännä räikkäkäsinojan vipu suuntaan, jonne haluat käsinojan liikkuvan (KUVA 2.2).

