

# Forest

## DENTALEZ



Katso symbolien selitykset, käyttöehdot, sähkömagneettista yhteensopivuutta / sähköturvallisuutta koskeva vakuutus ja käyttäjän ohjeet yleisestä Forest™:n käyttäjän oppaasta.

**KÄYTTÖAIHEET/KÄYTTÖTARKOITUS** Jakkaran tarkoitus on parantaa potilaan suuontelon näkyvyyttä ja hammaslääkärin ulottuvuutta suuonteloon diagnosoitaessa ja hoidettaessa kliinisessä ympäristössä. Tuotteelle ei ole vasta-aiheita.


**VAROITUS:** Tarkista pinta- ja estetoimenpiteet Forestin Hoitolaitteiston aseptiikka – käyttäjän oppaasta.

**TÄRKEÄ HUOMAUTUS:** Yhdysvaltain lain mukaan tätä välinettä saa myydä pätevä hammaslääkäri vain siinä Yhdysvaltain osavaltiossa, jossa hän toimii ja käyttää laitetta tai jossa hän tilaa laitteen, tai muu henkilö hammaslääkärin määräyksestä.

6156 LÄÄKÄRIN ECONOMY-JAKKARA, 6157  
HOITAJAN ECONOMY-JAKKARA JA 6160  
HOITAJAN DELUXE-JAKKARA (KUVA 1)

**VAIHE 1:** Löysää selkänojaa kääntämällä selkänojan korkeudensäätönuppia vastapäivään. Kun asento on hyvä, lukitse selkänoja paikalleen kääntämällä selkänojan korkeudensäätönuppia myötäpäivään (KUVA 1.1).

**VAIHE 2:** Säädä istuimen korkeutta nostamalla oikeanpuoleista vipua. Lukitse vapauttamalla vipu (KUVA 1.2).

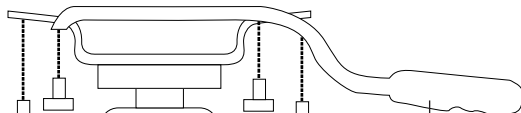

KUVA 1.1: SELKÄ-  
NOJAN KORKEU-  
DENSÄÄTÖNUPPI

KUVA 1.2: ISTUI-  
MEN KORKEU-  
DENSÄÄTÖVIPU



ISTUI-  
MEN ALLA



6159 LÄÄKÄRIN DELUXE-JAKKARA JA 6161  
HOITAJAN DELUXE-JAKKARA (KUVA 2)

**VAIHE 1:** Säädä istuimen korkeutta nostamalla oikeanpuoleista etuvipua (KUVA 2.1).

**VAIHE 2:** Säädä istuimen kaltevuutta nostamalla oikeanpuoleista takavipua (KUVA 2.2).

**VAIHE 3:** Löysää selkänojaa kääntämällä selkänojan korkeudensäätönuppia vastapäivään. Kun korkeus on hyvä, lukitse selkänoja paikalleen kääntämällä selkänojan korkeudensäätönuppia myötäpäivään (KUVA 2.3).


**VAIHE 4:** Säädä selkänojan kaltevuutta nostamalla vasenta vipua. Vapauta selkänoja painamalla vasenta vipua alas, kunnes vipu lukkiutuu paikalleen (KUVA 2.4).

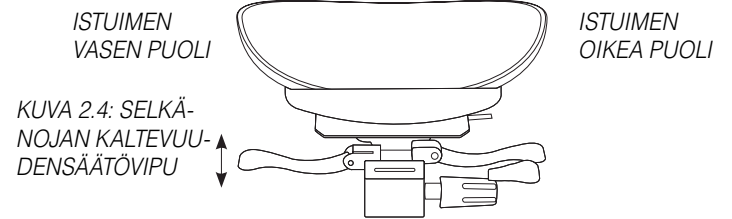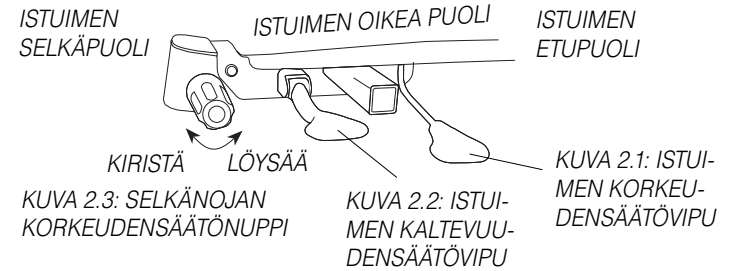

6160 JA 6161 HOITAJAN DELUXE-JAKKARA (KUVA 3)

**VAIHE 1:** Säädä ylävartalontukivarren korkeutta kääntämällä säätönuppia vastapäivään (löysää) tai myötäpäivään (kiristä) (KUVA 3.1).

**VAIHE 2:** Käännä räikkäkäsinojan vipu suuntaan, jonne haluat käsinojan liikkuvan (KUVA 3.2).

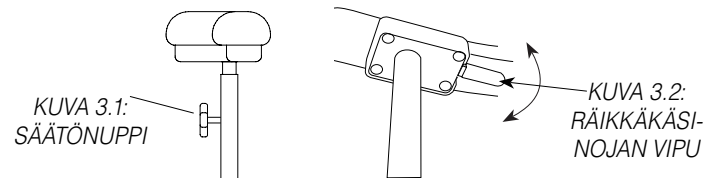

**DTE OREGON, INC.** DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

